

# Encuentre el tratamiento para la disfunción eréctil adecuado para usted



AMS 700™  
Implante de pene inflable

**EDCure**

La disfunción eréctil puede limitar su intimidad, afectar su autoestima y repercutir en la relación con su pareja.<sup>1</sup> Pero la buena noticia es que es posible tratar la disfunción eréctil.

### ¿Qué es la disfunción eréctil?

La disfunción eréctil es la incapacidad persistente para alcanzar o mantener una erección cuya firmeza permita realizar el coito.<sup>2</sup> La disfunción eréctil es un problema frecuente y debe saber que usted no es el único afectado.


### ¿Qué produce la disfunción eréctil?<sup>1-3</sup>

La disfunción eréctil ocurre cuando el flujo sanguíneo al pene es limitado o los nervios están dañados. La causa puede ser física, psicológica o una combinación de ambas. Las causas psicológicas incluyen estrés, ansiedad, culpa y depresión. Las causas físicas incluyen diabetes, enfermedad vascular, efectos secundarios de medicamentos y tratamiento del cáncer de próstata.



No es un paciente real.

### Afecciones comunes asociadas a la disfunción eréctil<sup>5</sup>

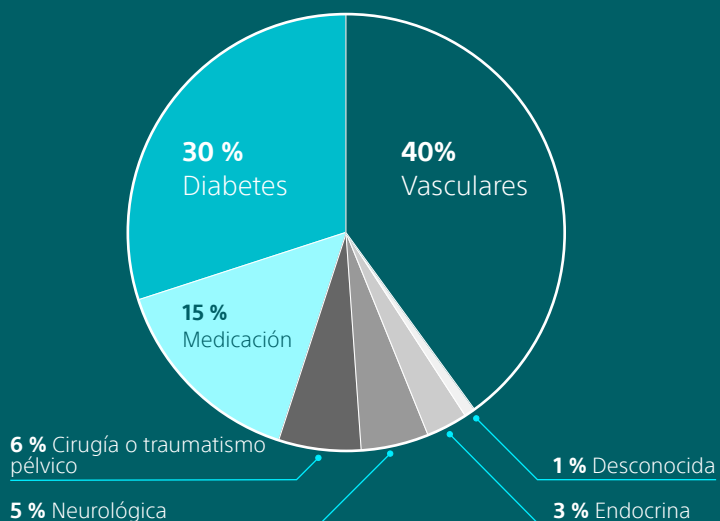

La disfunción eréctil no es solo un problema médico; también puede afectar profundamente las relaciones.<sup>1</sup>

*“La intimidad que solíamos tener desapareció. De repente, fue como si estuviéramos completamente separados. No había conexión entre nosotros.”*

— Tom

Los resultados de los estudios de casos no son necesariamente indicativos de los resultados en otros casos. Los resultados pueden variar en otros casos.

## Posibles opciones de tratamiento futuras<sup>2</sup>


**Independientemente de la causa de su disfunción eréctil, existen opciones de tratamiento. Los medicamentos orales son un primer paso habitual, pero no funcionan con todo el mundo o pueden dejar de funcionar.**

Otros tratamientos incluyen dispositivos de erección al vacío, inyecciones y supositorios intrauretrales. Un implante de pene está diseñado para ser un tratamiento a largo plazo para los hombres con disfunción eréctil y puede proporcionar una erección cuando y donde se desee.

### Implante de pene AMS 700™

Un implante de pene inflable, como el implante de pene AMS 700, puede ser una opción de tratamiento a largo plazo adecuada para los hombres con disfunción eréctil. Un implante de pene es un dispositivo que se implanta en el pene. Normalmente no es necesario pasar la noche en el hospital luego de la cirugía del implante.

El implante se oculta en el interior del cuerpo, por lo que nadie puede verlo. El usuario puede controlarlo para conseguir y mantener una erección durante el tiempo que desee.

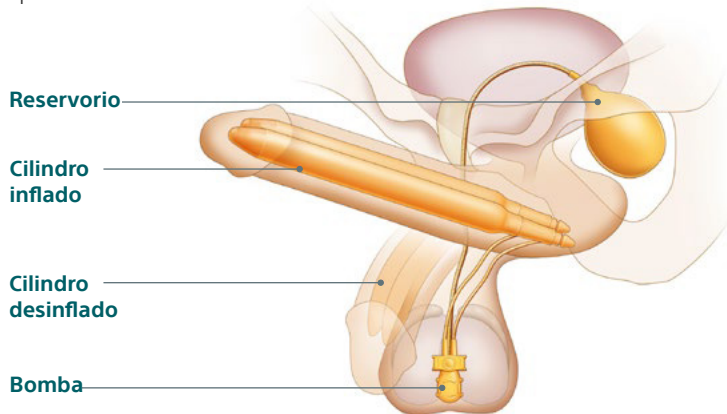

## Implantes de pene de Boston Scientific

Su médico le ayudará a decidir cuál es el implante más adecuado para usted.

### AMS 700™

Prótesis de pene inflable con TENACIO™ Pump LGX, CX, CXR

*Disponible en 2024 (EE. UU.)*



### AMS 700™

Prótesis de pene inflable con MS Pump™ LGX, CX, CXR

*Disponible en 2006 (EE. UU.)*



### Tactra™

Prótesis peniana maleable



**Los implantes de pene se han utilizado clínicamente durante más de 50 años y Boston Scientific ha vendido más de 500,000 implantes de pene.<sup>7,8</sup>**

Antes de la intervención, el médico le explicará cómo funciona el implante de pene. Hay disponible una Guía del paciente. Incluye el nombre del dispositivo y la bomba, así como instrucciones paso a paso sobre cómo usarlo. Puede consultar a su médico para obtener más información.

## ¿Sería adecuado para usted un implante de pene?

El implante de pene AMS 700 está diseñado para imitar muy de cerca una erección natural, proporcionando una rigidez al inflarse y una apariencia natural y flácida cuando se desinfla.

- Diseñado para ser un tratamiento a largo plazo para la disfunción eréctil
- Espontáneo: puede activar el dispositivo cuando lo desee
- Una vez activado, la erección puede durar todo el tiempo que desee
- Completamente contenido dentro del cuerpo; nadie sabe que posee un implante a menos que se lo diga
- Diseñado para sentirse natural durante el coito y, por lo general, no interfiere con la eyaculación o el orgasmo<sup>9-12</sup>
- Amplia gama de longitudes disponibles en función de su anatomía
- Los cilindros se expanden en longitud y en circunferencia
- Disponible con tratamiento previo con antibióticos para reducir el riesgo de infección

**Nota importante:** Los productos tratados previamente con antibióticos no son adecuados para pacientes alérgicos a la rifampicina, la minociclina HCl u otras tetraciclinas, ni para pacientes con lupus sistémico. Hable con su médico sobre las opciones de dispositivos que no contienen tratamiento con antibióticos.

# EDCure

Hable con alguien que haya pasado por lo mismo: Llámenos al **1-844-4ED-CURE** o envíenos un correo electrónico a

**MHPatientEducation@bsci.com** para que le presentemos a un paciente que encontró un tratamiento para la disfunción eréctil.

## Riesgos de un implante de pene:

- Ya no es posible la erección orgánica
- Infección, en cuyo caso cabe la posibilidad de que haya que retirar el implante. Ciertas afecciones, como la diabetes, las lesiones de la médula espinal o las infecciones de la piel, pueden aumentar el riesgo de infección.
- Dolor (por lo general relacionado con el proceso de cicatrización)
- Fallo mecánico del implante que puede requerir una intervención quirúrgica adicional
- Reemplazo del dispositivo; el implante tiene una vida útil de hasta 10 años
- Inflado involuntario del dispositivo

**En una encuesta de 194 pacientes que recibieron un implante de pene AMS 700 con una bomba Momentary Squeeze (MS):<sup>4</sup>**

**95%** de los pacientes se mostraron satisfechos o muy satisfechos con sus relaciones sexuales

**95%** de los pacientes se mostraron satisfechos o muy satisfechos con su actividad sexual

**En una encuesta de 80 pacientes que recibieron un implante de pene AMS 700:<sup>6</sup>**

**97%** de los pacientes **recomendarían** un implante de pene a un amigo

**Visite EDCure.com para hacer lo siguiente:**

- Completar el cuestionario en línea sobre la disfunción eréctil y obtener los resultados.
- Encontrar un médico de disfunción eréctil en su área.
- Inscribirse en seminarios gratuitos de información para pacientes para conocer las opciones de tratamiento.
- Descubrir cómo personas reales como usted han tratado la disfunción eréctil.
- Obtener respuestas a preguntas comunes sobre la disfunción eréctil, los implantes de pene y la cobertura del seguro.



## Referencias

1. DiMeo PJ. Psychosocial and relationship issues in men with erectile dysfunction. *Urol Nurs*. 2006;26:442-446.
2. Erectile Dysfunction. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/erectiledysfunction.html>. Con acceso el 16 de julio de 2024.
3. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB. Impotence and its medical and psychosocial results of the Massachusetts Male Aging Study. *J Urol*. 1994;151:54-61.
4. Otero JR, Cruz CR, Gómez BG, et al. Comparison of the patient and partner satisfaction with 700CX and Titan penile prostheses. *Asian J Androl*. 2017 May-Jun;19(3):321-5.
5. Shabsigh R, Lue TF. A Clinician's Guide to ED Management. New York: Haymarket Media Inc.; 2006.
6. Bettocchi C, Palumbo F, Spilotros M, et al. Patient and partner satisfaction after AMS inflatable penile prosthesis implant. *J Sex Med*. 2008;5:1503-1512.
7. Datos en los archivos de Boston Scientific.
8. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology*. 1973;2:80-82.
9. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institutional study in 200 consecutive patients. *Eur Urol*. 2000 Jan;37(1):50-5.
10. Levine LA, Becher EF, Bella AJ, et al. Penile Prosthesis Surgery: Current Recommendations From the International Consultation on Sexual Medicine [published correction appears in *J Sex Med*. 2016 Jul;13(7):1145]. *J Sex Med*. 2016;13(4):489-518. doi:10.1016/j.jsxm.2016.01.017
11. Eli Coleman PhD, Alan Listiak PhD, Gordon Braatz PhD & Paul Lange MD (1985): Effects of Penile Implant Surgery on Ejaculation and Orgasm, *Journal of Sex & Marital Therapy*, 11:3,199-205
12. Bae JH, Song PH, Kim HT, Moon KH. Assessment of erectile and ejaculatory function after penile prosthesis implantation. *Korean J Urol*. 2010 Mar;51(3):202-7.

**Precaución:** Las leyes federales de los Estados Unidos solo permiten la venta de este dispositivo bajo prescripción facultativa.

Su médico es la mejor fuente de información sobre los riesgos y las ventajas de la Prótesis de pene inflable AMS 700™. Hable con su médico para obtener una lista completa de los riesgos, las advertencias y la información importante de seguridad. El implante de una prótesis de pene daña o destruye cualquier capacidad de erección natural subsistente, y no es compatible con otras opciones de tratamiento (medicamentos orales, dispositivos de vacío o inyecciones).

Los hombres con diabetes, lesiones en la médula espinal o infecciones cutáneas pueden sufrir un mayor riesgo de infección. El implante puede provocar la curvatura o deformidad cicatricial del pene. Algunos dispositivos AMS 700 contienen un antibiótico (tratamiento antibiótico superficial InhibiZone™). El dispositivo no es adecuado para pacientes con alergia a los antibióticos contenidos en el dispositivo (rifampicina, clorhidrato de minociclina u otras tetraciclinas) o con lupus sistémico; estos pacientes deberán utilizar un dispositivo que no contenga el tratamiento antibiótico de superficie InhibiZone.

Entre los riesgos se encuentran los siguientes: funcionamiento defectuoso o fallo del dispositivo que hace necesaria una nueva intervención, desplazamiento del dispositivo con posible exposición del mismo a través del tejido, desgaste/pérdida de tejido (erosión del dispositivo/tejido), infección, inflado involuntario del dispositivo y dolor/inflamación. MH-545411-AD

Todas las imágenes son propiedad de Boston Scientific. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

## Recomendaciones de pacientes

Las historias recogidas en este folleto relatan las experiencias vividas por personas que utilizan terapias de Boston Scientific relacionadas con la disfunción eréctil. Boston Scientific ha invitado a estas personas a compartir sus historias con franqueza. Cuando las revise, recuerde que se trata de experiencias específicas de unas personas determinadas. Como ocurre con cualquier tratamiento médico, no todas las reacciones son iguales. Le recomendamos que hable con su médico sobre el tratamiento adecuado para usted.

Los pacientes que aparecen en este folleto podrían haber sido compensados por su viaje o tiempo.

Los resultados de los estudios de casos no son necesariamente indicativos de los resultados en otros casos. Los resultados pueden variar en otros casos.

**Boston  
Scientific**  
Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation  
300 Boston Scientific Way  
Marlborough, MA 01752-1234  
[www.BostonScientific.com](http://www.BostonScientific.com)

© 2024 Boston Scientific  
Corporation o sus afiliados.  
Todos los derechos reservados.

MH-546505-AB AGOSTO 2024

